


DECUHEEL™

THE CURE IS CARE

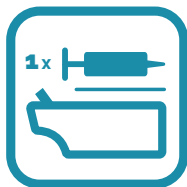

Decumed ApS · Skovringen 3 · DK - 2950 Vedbæk · +45 40168632 · sb@decumed.com

WWW.DECUMED.COM

Version 082014





BRUKSANVISNING

SE

Decuheel uppblåsbar patientspecifik hälavlastare

- Hälavlastaren får endast användas till förebyggande av hälsår, i samband med behandling av hälsår och till elevation av hål. Veckla ut hälavlastaren. För in pumpmunstycket i den självförslutande ventilen. Pumpa upp hälavlastaren till 3/4, inte mer. Hälavlastaren får inte vara fullt uppumpad, eftersom den då blir hård och kan skada patienten, eller gå sönder.
- Hälavlastaren är nu klar att användas.
- Placera patientens fot i den uppblåsta hälavlastaren. Fotsulan ska vila mot den del av hälavlastaren som markerats med en illustration av en fot. Vaden ska stödjas av den stora luftfyllda delen i botten.
- Hälen ska vara höjd över underlaget (madrassen). Justera lufttrycket tills korrekt lyfthöjd för hälen uppnåtts (1-2 cm); detta kan göras medan patientens ben ligger i hälavlastaren.
- Trycket i hälavlastaren sänks genom att den medföljande pinnen försiktigt förs in i ventilen så att luft släpps ut tills önskat tryck har uppnåtts.
- Fäst bandet. OBS! Bandet får inte strama åt.
- Vid kassering av produkten kan den punkteras t.ex. genom klippa av ett hörn.
- Sorteras som vanligt hushållsavfall.
- Hälavlastaren kan användas direkt mot huden. Hälavlastaren är patientspecifik och får inte användas till patient nummer 2.
- Produkten innehåller inte ftalater



VARNING

- Vid för högt lufttryck kan avlastaren brista med högt ljud som följd.
- Hälavlastaren får endast fyllas med luft.
- Att använda annan gas kan medföra brandrisk.
- Hälavlastaren får inte komma i direktkontakt med sår på grund av risk för infektion.
- Vidmakthåll alltid korrekt tryck i hälavlastaren. Vid bristande luftfyllnad finns risk för trycksår.
- Decuheel får endast användas i uppblåst skick.
- Får inte användas i närheten av öppen eld.
- Defekta hälavlastare skall kasseras omedelbart