


DECUHEEL™

THE CURE IS CARE

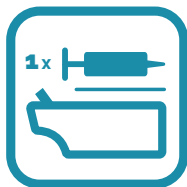

Decumed ApS · Skovringen 3 · DK - 2950 Vedbæk · +45 40168632 · sb@decumed.com

WWW.DECUMED.COM

Version 082014





KÄYTTÖOHJE

Decuheel – ilmatäytteinen kertakäyttöinen kannankohottaja



- Kannankohottaja on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kantapäähaavojen ehkäisyyn ja hoitoon sekä kantapään kohottamiseen.
- Levitä kannankohottaja auki. Aseta pumpun suutin itsesulkeutuvaan venttiiliin. Pumpkaa kannankohottaja sopivan kovaksi (noin $\frac{3}{4}$ tilavuudesta). Kannankohottajaa ei saa pumpata täyteen, sillä kovuus saattaa aiheuttaa vammoja potilaalle ja vahingoittaa kannankohottajaa. Kannankohottaja on nyt käyttövalmis. Aseta potilaan jalka ilmalla täytettyyn kannankohottajaan.
- Jalkapohjan tulee levätä kannankohottajassa olevaa jalan kuvaa vasten. Suuri ilmatäytteinen alaosa tukee pohjetta.
- Kantapään on tarkoitus asettua tuen (patjan) päälle. Säädä ilmanpaine siten, että kantapää lepää oikealla korkeudella (1–2 cm). Ilmanpainetta voi säätää potilaan jalan ollessa kannankohottajan sisällä.
- Jos haluat laskea painetta, työnnä pakkauksen mukana toimitettu putki varovasti venttiiliin ja päästä ilmaa ulos, kunnes kannankohottajan kovuus on sopiva. Sido nauha, mutta älä kiristä liikaa.
- Kannankohottajan voi ennen hävittämistä puhkaista esimerkiksi leikkaamalla yhden kulman auki. Hävitä tavallisen sekajätteen mukana.
- Kannankohottajaa voi käyttää suoraan ihoa vasten. Kannankohottaja on potilaskohtainen ja kertakäyttöinen.
- Ei sisällä ftalaatteja



VAROITUS

- Jos kannankohottajan paine on liian suuri, tynny saattaa puhjeta ja aiheuttaa korkean äänenpaineen.
- Kannankohottajan saa täyttää vain ilmakehän ilmalla.
- Muunlaisella kaasulla täyttäminen saattaa aiheuttaa syttymisvaaran.
- Infektorisikin vuoksi kannankohottaja ei saa olla kosketuksessa haavoihin.
- Huolehdi oikeasta paineesta. Liian alhainen paine saattaa aiheuttaa makuuhaavoja.
- Kannankohottajaa saa käyttää vain täytettynä.
- Kannankohottajaa ei saa käyttää avotulen lähellä.
- Viallinen kannankohottaja on hävitettävä välittömästi